

NOTICE DE MISE EN PLACE DU CORSET TROIS POINTS

Le corset dit « LYONNAIS TROIS POINTS » est un corset de correction. Son but est dans un premier temps de stopper la déformation.

Pour cela il doit être porté très près du corps, le serrage doit être progressif afin d'éviter toutes contraintes cutanées.

Mise en place :

1. Se vêtir d'un des T shirt fournis.
2. Ouvrir le corset dans sa totalité et l'enfiler de manière à placer l'ouverture sur le côté.
3. Mettre le T-shirt en tension afin d'éviter les plis.
4. Il faut s'assurer que le corset soit bien positionné sur les hanches. Placer le verrou ventral dans son logement. Soulever la molette rouge du verrou et faire glisser la barrette. Le serrage sera déterminé avec votre applicateur Néo-Orthopédie, il déterminera avec vous le cran auquel le verrou devra être enclenché.

Le corset est en place.

Pour enlever le corset, effectuer l'action inverse.

Avertissement :

Il est important de vérifier l'état cutané avant et après le port du corset. En effet il peut y avoir des rougeurs occasionnées par les zones d'appuis mais en aucun cas ces zones d'appuis doivent être douloureuses. Si un bleu (ecchymose) apparaît, contactez immédiatement votre applicateur Néo-Orthopédie, des modifications sur votre corset doivent être apportées.