

# NOTICE DE MISE EN PLACE DU CORSET CTM

Le corset dit « CTM » est un corset de correction. Son but est dans un premier temps de stopper la déformation.

Pour cela il doit être porté très près du corps, le serrage doit être progressif afin d'éviter toutes contraintes cutanées.

## **Mise en place :**

1. Se vêtir d'un des T shirts fournis.
2. Ouvrir le corset dans sa totalité et l'enfiler de manière à placer l'ouverture devant soi.
3. Mettre le T-shirt en tension afin d'éviter les plis, puis positionner la sous patte transparente contre le T-shirt. Cet élément servira de glissière lors de la fermeture du corset.
4. Il faut s'assurer que le corset soit bien positionné sur les hanches. Placer le verrou ventral dans son logement et fermer les velcros supérieurs et inférieurs de manière alternée et progressive afin d'entendre un nombre de « clic » déterminé avec votre applicateur Néo-Orthopédie.
5. La fermeture du verrou supérieur s'effectue de la même manière que le verrou ventral à la différence qu'il n'y a pas de velcros pour accompagner la fermeture. Après le premier cran enclenché, il faudra soulever la gâchette rouge et pousser le verrou au cran déterminé avec votre applicateur Néo-Orthopédie.

Le corset est en place.

Pour enlever le corset, effectuer l'action inverse.

## *Avertissement :*

*Il est important de vérifier l'état cutané avant et après le port du corset. En effet il peut y avoir des rougeurs occasionnées par les zones d'appuis, mais en aucun cas ces zones d'appuis doivent être douloureuses. Si un bleu (ecchymose) apparaît, contactez immédiatement votre applicateur Néo-Orthopédie, des modifications sur votre corset doivent être apportées.*