

# NOTICE DE MISE EN PLACE DU CORSET ANTICYPHOSE

Le corset dit « ANTICYPHOSE » est un corset de correction. Son but est dans un premier temps de stopper la déformation.

Pour cela il doit être porté très près du corps, le serrage doit être progressif afin d'éviter toutes contraintes cutanées.

Son principe de fonctionnement est basé sur la flexion du rachis par le biais de l'appui sternal.

## **Mise en place :**

1. Se vêtir d'un des T shirts fournis.
2. Ouvrir le corset dans sa totalité et l'enfiler de manière à placer l'ouverture devant soi. Positionner la partie dorsale bien sur les hanches : vous pouvez vous aider d'un mur en plaçant le corset entre le mur et vous.
3. Mettre le T-shirt en tension afin d'éviter les plis.
4. Placer la valve ventrale par-dessus les sous pattes en cuir et s'assurer que la valve soit bien positionnée sur les hanches.  
Fermer modérément le corset à l'aide des velcros d'un côté puis de l'autre puis des deux côtés simultanément. Vous devez apporter une attention particulière aux velcros supérieurs (sous les bras). En effet ce sont ces velcros qui provoquent une action efficace sur la correction de la cyphose.

Le serrage sera déterminé avec votre applicateur Néo-Orthopédie

Le corset est en place.

Pour enlever le corset, effectuer l'action inverse.

## *Avertissement :*

*Il est important de vérifier l'état cutané avant et après le port du corset. En effet il peut y avoir des rougeurs occasionnées par les zones d'appuis, mais en aucun cas ces zones d'appuis doivent être douloureuses. Si un bleu (ecchymose) apparaît, contactez immédiatement votre applicateur Néo-Orthopédie, des modifications sur votre corset doivent être apportées.*