

NOTICE DE MISE EN PLACE DU CORSET MILWAUKEE

Le corset dit « MILWAUKEE » est un corset de correction. Son but est dans un premier temps de stopper la déformation.

Pour cela il doit être porté très près du corps, le serrage doit être progressif afin d'éviter toutes contraintes cutanées.

Son principe de fonctionnement est basé sur l'élongation du rachis par le biais d'un collier cervical, une main d'appui thoracique peut être adjointe.

Mise en place :

1. Se vêtir d'un des T shirt fournis
2. Ouvrir le corset dans sa totalité (collier et corset) et l'enfiler de manière à placer l'ouverture dans le dos. L'enfant devra placer les bras, le corset ouvert, à l'intérieur des montants postérieurs.
3. Mettre le T-shirt en tension afin d'éviter les plis.
4. Il faut s'assurer que le corset soit bien positionné sur les hanches. Placer la main dorsale, puis serrer modérément par le biais de la boucle située sur le montant antérieur.
5. Fermer le corset à l'aide des velcros.
Fermer le collier à l'aide de la vis moletée.

Le serrage sera déterminé avec votre applicateur Néo-Orthopédie

Le corset est en place.

Pour enlever le corset, effectuer l'action inverse.

Avertissement :

Il est important de vérifier l'état cutané avant et après le port du corset. En effet il peut y avoir des rougeurs occasionnées par les zones d'appuis mais en aucun cas ces zones d'appuis doivent être douloureuses.

Si un bleu (ecchymose) apparaît, contactez immédiatement votre applicateur Néo-Orthopédie, des modifications sur votre corset doivent être apportées.